

---

## Молокоотсос с контейнером для сбора молока.

1. Молокоотсос прост в использовании и уходе, позволяет кормящей маме заранее сцедить молоко, чтобы через определенное время покормить малыша.
2. Противопоказаний к применению не обнаружено. При возникновении проблем во время сцеживания молока попробуйте помассировать грудь. Если массаж не помогает разрешить трудности, обратитесь к врачу. Неправильное или слишком частое использование молокоотсоса может привести к проблемам со здоровьем!
3. Перед применением молокоотсоса убедитесь, что изделие вымыто.
4. Сожмите грушу рукой. Приложите воронку молокоотсоса к груди, так, чтобы контейнер для сбора молока располагался снизу изделия. Разожмите грушу. В момент распрямления груши в молокоотсосе создается разрежение и происходит процесс сцеживания. Слейте молоко в бутылочку и повторите процесс.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все детали изделия горячей водой с мылом и ополосните. Не стерилизуйте изделие и не кипятите его. После использования тщательно промойте все детали молокоотсоса горячей водой с мылом и ополосните. Убедитесь, что молоко не осталось ни в одной из частей конструкции. Высушите при комнатной температуре.