

Молокоотсос для стандартной бутылочки в наборе с бутылочкой и силиконовой соской.

1. Молокоотсос прост в использовании и уходе, позволяет кормящей маме заранее сцедить молоко, чтобы через определенное время покормить малыша.
2. Противопоказаний к применению не обнаружено. При возникновении проблем во время сцеживания молока попробуйте помассировать грудь. Если массаж не помогает разрешить трудности, обратитесь к врачу. Неправильное или слишком частое использование молокоотсоса может привести к проблемам со здоровьем!
3. Перед применением молокоотсоса убедитесь, что изделие вымыто.
4. Соедините молокоотсос с бутылочкой для кормления. Приложите воронку молокоотсоса к груди, так, чтобы бутылочка располагалась снизу изделия. Сжимая и разжимая грушу, сцедите молоко.
5. Перед первым использованием тщательно промойте все детали горячей водой с мылом и ополосните. Воронку и грушу не стерилизуйте и не кипятите. Бутылочку мойте ершиком горячей водой с мылом или специальным средством для мытья детской посуды, тщательно споласкивайте. Можно мыть в посудомоечной машине в верхнем отделении. Бутылочку стерилизуйте или обрабатывайте кипячением в открытой посуде не более 5 минут; соску в течение 30 минут. После каждого использования промойте горячей водой с мылом, тщательно ополосните. Убедитесь, что молоко не осталось ни в одной из частей конструкции. Сушите при комнатной температуре. Храните соски сухими в закрытой посуде, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел, растворителей, кислот. Перед кормлением малыша из бутылочки всегда проверяйте соску на наличие трещин и механических повреждений. При их обнаружении не используйте соску.